

車椅子用体重計

ヘルスアシスト HA-4 J

意匠登録済

実用新案登録済

ホームページURL <http://www.groupe-assist.com>

特長

- ・車椅子に乗ったまま体重が測れます。
- ・軽量なので女性が楽に運べます。(約5.3kg)
- ・材質はアルミ、ジュラルミンなので錆びることはありません。
- ・施設やご家庭で気軽に体重測定ができます。
- ・薄型なので収納時に邪魔になりません。
- ・転倒防止ストッパーが裏面4箇所に付いているので安全に体重測定ができます。
- ・ヘルスマーターの交換、がお客様ご自身でできます。

定価: ¥127,440(税込)



仕様

項目	数値
使用体重計	オーム電機 YB-007WT (H27年5月現在)
最大測定重量	135kg (最小読取値は100g)
全長	800mm
全幅	725mm
厚さ	50mm
s	360mm~670mm
重量	約5.3kg

仕様は予告なく変更する場合があります

注意1. 踏み台やはしご代わりに絶対にはしないでください。大けがを負う可能性があります。

注意2. 床を傷つけることがあります。薄く滑りにくいマットの上でご使用ください。

使用方法

順序	使用方法
1	ヘルスアシストを水平な床に薄く滑りにくいマットなどの上に置いてください。
2	ヘルスアシストに車椅子を乗上げてください。乗上げる時の傾斜は約7度です。 図-1 参照
3	シーソー式なので容易にヘルスアシストと床が水平になった事が分ります。 図-2 参照
4	車椅子の両輪の車輪ストッパーを確実に掛けてください。
5	介助の方が体重を読み取ってください。
6	体重を測り終わったら、前進またはバックでヘルスアシストから降りてください。

製造・販売

グループアシスト

〒213-0015
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷3-10-15
Email info@groupe-assist.com
Tel/fax 044-857-0776
携帯電話 080-5033-9111
留守にしている事が多いので携帯へ連絡ください

販売店

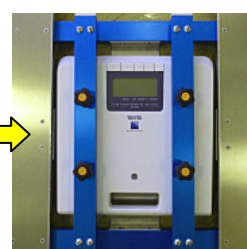


図-3

図-3参照



HBF-922 (ご購入時のヘルスマーター)



WB-260A (検定付ヘルスマーターに交換した例)

図-1



図-2




車椅子用体重計

ヘルスアシスト HA-4 J オプション 段差解消スロープ

ホームページURL <http://www.groupe-assist.com>

ヘルスアシストに乗る時の段差と傾斜を解消するスロープです
販売台数1, 500台の実績で、皆様のご要望により新発売！

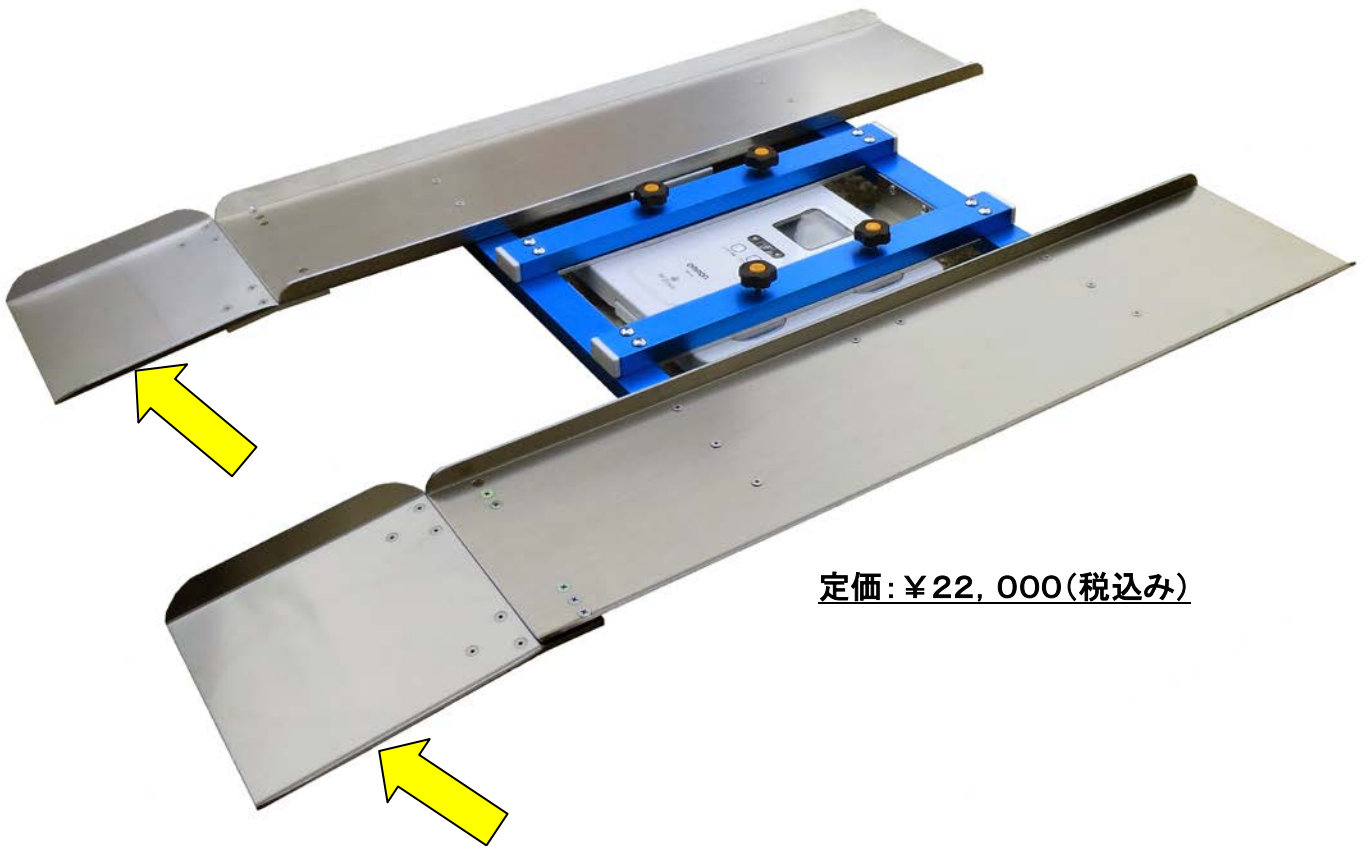

定価: ¥22,000(税込み)

製品名 HA-4EXS

材質: シュラルミン, アルミニウム

寸法: 横225mm×縦210mm

重量: 500g×2枚 合計1kg

取付用部材: 皿ねじM5×15, M5丸座金, M5スプリングワッシャー, M5ナット各12個

製造・販売

販売店

グループアシスト

〒213-0015
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷3-10-15
Email info@groupe-assist.com
Tel/fax 044-857-0776
携帯電話 080-5033-9111
留守にしている事が多いので携帯へ連絡ください

